

# VASCHE CON LA PORTA LINEA OCEANO

## MANUALE D'USO E MANUTENZIONE



**ASSISTENZA  
POST VENDITA**

NUMERO VERDE

**800 845 604**



**ATTENZIONE  
PER SMALTIMENTO CONTATTARE**

NUMERO VERDE

**800 845 604**





*Gentile Cliente,*

*La ringraziamo per aver scelto questa Vasca con Porta della Linea Oceano realizzata, come i suoi accessori, con la massima cura ed i migliori materiali per garantire nel tempo comfort, sicurezza e benessere.*

*Il presente manuale è una guida all'utilizzo in modo sicuro della Vasca con Porta Linea Oceano.*

*E' quindi indispensabile leggerlo in tutte le sue parti prima di utilizzare il prodotto e conservarlo per eventuali consultazioni future.*

*Linea Oceano si riserva il diritto di apportare modifiche al presente manuale senza obbligo alcuno.*



# INDICE

<b>Limitazioni e destinazioni d'uso</b>	<b>Pag. 3</b>
<b>APERTURA E CHIUSURA DELLA PORTA</b>	<b>Pag. 4</b>
- Chiusura di sicurezza	<b>Pag. 4</b>
<b>RIEMPIMENTO DELLA VASCA</b>	<b>Pag. 5</b>
- Miscelatore Termostatico	<b>Pag. 5</b>
<b>SVUOTAMENTO DELLA VASCA</b>	<b>Pag. 6</b>
- Svuotamento rapido	<b>Pag. 6</b>
<b>ACCESSORI AGGIUNTIVI</b>	<b>Pag. 7</b>
- Idromassaggio Aria/Aria	<b>Pag. 7</b>
- Cromoterapia	<b>Pag. 8</b>
- Schienale Riscaldato	<b>Pag. 8</b>
<b>Manutenzione e Pulizia</b>	<b>Pag. 9</b>
<b>Avvertenze</b>	<b>Pag. 10</b>

## LIMITAZIONI E DESTINAZIONI D'USO

Questa vasca con porta è stata progettata e realizzata ad **uso esclusivo degli esseri umani**.

Questa vasca con porta **è indicata** per il bagno e l'igiene di persone:

- Autosufficienti
- Con difficoltà motorie (persone anziane o con handicap fisici) o handicap mentali, aiutate da persone adulte se non in grado di auto sostenersi.

Questa vasca con porta **NON è indicata** per il bagno e l'igiene di persone:

- Con importante handicap fisico, quale paralisi totale
- Alte meno di 100 cm
- Pesanti più di 150 kg

Le vasche da bagno con accesso facilitato sono destinate ad essere installate in abitazioni private, bagni e piscine RSA. Nella RSA in particolare, la persona deve essere assistita durante il bagno.

L'autorizzazione all'uso di questa vasca in ambienti diversi da quelli sopra descritti, deve essere fornita direttamente dal produttore.

## APERTURA E CHIUSURA DELLA PORTA



**Per aprire** la porta della vasca, spostare con delicatezza la leva verso l'interno o verso l'esterno della vasca, nella direzione indicata dalle frecce argentate applicate sulla porta, avendo cura di non appoggiarsi, né fare peso sulla porta per non causare danni alle cerniere.

**Per chiudere** avvicinare la porta il più possibile alla posizione di chiusura e spostare la leva nella direzione indicata.

Per evitare di schiacciarsi le dita durante la chiusura/apertura della porta e durante le operazioni di pulizia della vasca, non mettere mai le mani vicino alle cerniere. E' importante, dopo ogni utilizzo, asciugare bene la guarnizione sul bordo della porta (vedi capitolo "Manutenzione e pulizia").


**NB:** Durante l'entrata e l'uscita dalla vasca utilizzare solo ed esclusivamente gli appositi maniglioni ed evitare assolutamente di sorreggersi alla rubinetteria, alla tendina o al saliscendi della doccia.

### Porte con optional CHIUSURA DI SICUREZZA:




Per **aprire** la porta della vasca sbloccare la chiusura di sicurezza sollevando il fermo **(A)** e facendolo ruotare in direzione opposta.

Per **chiudere e bloccare** la porta in modo sicuro, ruotare il fermo in modo da far coincidere le due superfici piane **(1 e 2)**, della maniglia **(B)** e del fermo **(A)**.

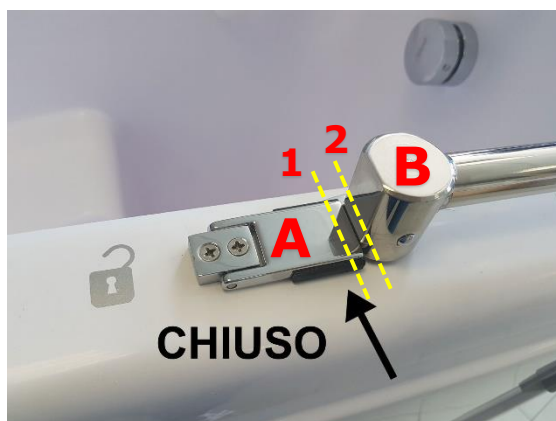


## RIEMPIMENTO DELLA VASCA

L'acqua viene erogata dalla **manopola di deflusso (C)** che ha anche funzione di "troppo pieno".

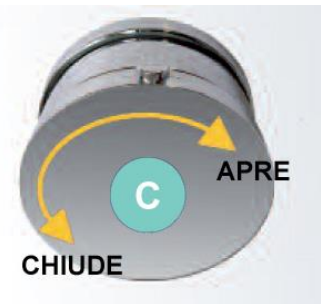

Per riempire la vasca aprire il **rubinetto miscelatore (A)** e per regolare la temperatura dell'acqua ruotare la leva del miscelatore verso destra o verso sinistra.

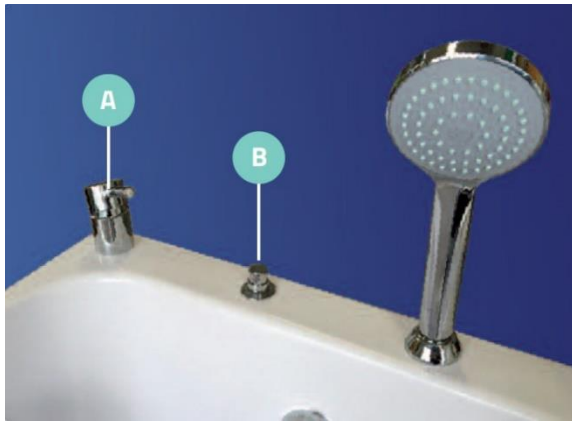


Per usare il doccia premere il **pulsante deviatore (B)** intanto che l'acqua è aperta, avendo cura di direzionare il getto verso l'interno della vasca.

Il deviatore torna in modalità riempimento ogni volta che si chiude l'acqua.

### Vasche con optional MISCELATORE TERMOSTATICO:

Per riempire la vasca ruotare la **leva (A)** in senso antiorario e per ottenere la temperatura dell'acqua desiderata ruotare la **manopola graduata (B)** verso destra o verso sinistra. Per evitare scottature, su questa manopola è presente un **pulsante di sicurezza di colore rosso (C)** che blocca la rotazione nella posizione massima di 38 °C. Premere questo pulsante (C) se si vuole sbloccare la corsa della manopola ed ottenere temperature più elevate.

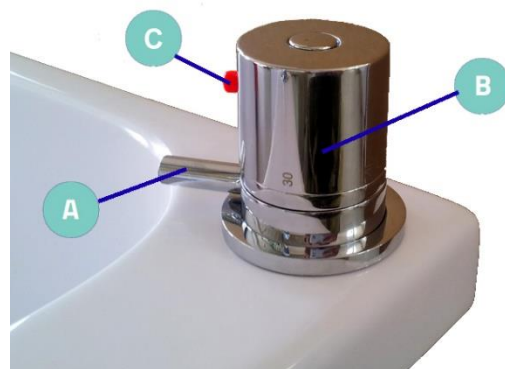



## SVUOTAMENTO DELLA VASCA

**NB:** La vasca può essere utilizzata senza essere riempita completamente, utilizzandola come una doccia con la seduta, oppure solo per il pediluvio, con o senza idromassaggio.



Per svuotare la vasca **ruotare la manopola di deflusso verso destra** e attendere che la vasca sia completamente vuota.

Solo quando l'acqua è completamente defluita è possibile aprire la porta.

Fare attenzione alle eventuali gocce d'acqua in prossimità della porta, le quali possono rendere il pavimento scivoloso.

### Vasche con optional **SVUOTAMENTO RAPIDO:**



Connettere il sistema alla corrente elettrica, la corona del pulsante inox di colore **BIANCO vicino al miscelatore** si accenderà a bassa intensità, ciò significa che la funzione di svuotamento è in standby, pronta per essere utilizzata.

La funzione di svuotamento rapido consente di svuotare le vasche Linea Oceano molto più velocemente rispetto al normale sistema di svuotamento e agisce indipendentemente, quindi può essere utilizzata separatamente o simultaneamente.

Una volta terminato il bagno, per avviare la funzione di svuotamento rapido premere il pulsante che azionerà la pompa finché il livello dell'acqua non diminuirà a circa 10 cm, dopodiché la pompa si spegnerà automaticamente e la restante acqua verrà rimossa attraverso il normale sistema di svuotamento.

La funzione di svuotamento rapido può essere interrotta prima che la vasca sia vuota, semplicemente premendo di nuovo il pulsante, che arresterà la pompa.

Al termine dell'utilizzo scollegare l'impianto dalla corrente elettrica.

## ACCESSORI AGGIUNTIVI

**CHIUSURA DI SICUREZZA (vedi pagina 4)**

**MISCELATORE TERMOSTATICO (vedi pagina 7)**

**SVUOTAMENTO / RIEMPIMENTO RAPIDO (vedi pagina 8)**

**IDROMASSAGGIO ARIA/ARIA**



Connettere il sistema alla corrente elettrica, la corona del pulsante inox di colore **BLU** si accenderà a bassa intensità, ciò significa che l'idromassaggio è in standby, pronto per essere utilizzato.

L'idromassaggio partirà solo se nella vasca ci saranno almeno 25 cm d'acqua circa, in questo caso la corona blu si illumina intensamente e l'aria inizierà ad uscire. Se invece la corona

lampeggia, significa che l'acqua non ha raggiunto la sonda ed occorre aumentarne il livello.

E' quindi possibile usufruire dell'idromassaggio anche solo per la "zona piedi". Per interrompere l'idromassaggio pigiare nuovamente il pulsante: il sistema torna in standby.

L'intensità dell'idromassaggio può essere variata su **5 livelli di potenza**: all'avvio si posiziona automaticamente sul livello 3 (intermedio), per diminuirla o modificarla premere il pulsante più volte, fino all'intensità desiderata.

L'idromassaggio si spegne automaticamente dopo 20 minuti (può essere interrotto prima), per farlo ripartire premere nuovamente il pulsante.

Durante l'idromassaggio evitare di utilizzare il bagnoschiuma o altri prodotti che generano schiuma.

**Pulizia automatica delle tubazioni:** dopo ogni utilizzo dell'idromassaggio, il sistema rimuove l'acqua dalle tubazioni, è quindi **necessario non scollegare la corrente elettrica** prima che questa operazione venga effettuata (circa 20 minuti dopo che la vasca è stata svuotata del tutto).

Durante i 20 minuti di attesa, la corona del tasto lampeggia, per segnalare lo stato di attesa pulizia automatico.

Dopo il soffiaggio la vasca torna in standby e può essere effettuato un nuovo ciclo d'idromassaggio.

Al termine dell'utilizzo scollegare l'impianto dalla corrente elettrica.



## CROMOTERAPIA



Connettere il sistema alla corrente elettrica, la corona del pulsante inox di colore **BIANCO** si accenderà a bassa intensità, ciò significa che la cromoterapia è in standby, pronta per essere utilizzata. Il sistema è sempre abilitato, indipendentemente dalle altre funzioni e dalla presenza o meno dell'acqua nella vasca. Premendo il tasto per 1 secondo, la corona si accende. Pigiando nuovamente e brevemente il tasto, si selezionano gli altri 11 colori fissi, oppure le 5 sequenze automatiche.

### Colori fissi (in ordine):

1. Bianco - 2. Azzurro - 3. Blu - 4. Violetto - 5. Fucsia - 6. Rosso - 7. Rosa - 8. Arancio - 9. Giallo - 10. Verde mela - 11. Verde

### Successive 5 sequenze automatiche sono (in ordine):

1. Sequenza Energy (Rosso, Arancio, Giallo, Bianco, Giallo, Arancio)
2. Sequenza Tonic (Giallo, Rosso, Verde)
3. Sequenza Relax (Blu, Verde, Bianco, Verde)
4. Sequenza Sun (Giallo, Arancio, Giallo, Azzurro, Giallo, Bianco)
5. Sequenza Dream (Verde, Blu, Azzurro, Bianco, Arancio, Rosso, Viola)

Per spegnere la Cromoterapia tenere premuto il tasto per 1 secondo. La funzione si spegne automaticamente dopo 2 ore. Terminato l'utilizzo scollegare dalla corrente elettrica.

## SCHIENALE RISCALDATO



Connettere il sistema alla corrente elettrica, la corona del pulsante inox di colore **ROSSO** si accenderà a bassa intensità, ciò significa che il riscaldatore è in standby, pronto per essere utilizzato. Premere il pulsante per attivare il riscaldatore, la luce più intensa indica che è entrato in funzione.

Lo schienale riscaldato delle vasche Linea Oceano è progettato per riscaldarsi fino a 27 °C, ed è consigliabile **accenderlo 15 minuti prima** dell'utilizzo della vasca.

Il riscaldatore si spegne automaticamente dopo 20 minuti e può essere riattivato ripremendo il pulsante (questa operazione può essere ripetuta tutte le volte che si desidera).

Al termine dell'utilizzo scollegare l'impianto dalla corrente elettrica.

## MANUTENZIONE E PULIZIA

Per mantenere la vasca ed i suoi accessori perfettamente funzionanti **devono essere seguite alcune semplici regole:**

- **Usare esclusivamente** detergenti liquidi e panni morbidi per mantenere brillanti e pulite le superfici della vasca e dei suoi accessori.

- **NON usare assolutamente** solventi, prodotti abrasivi, paglietta d'acciaio, carta vetrata o getti di vapore per pulire le superfici. E' possibile utilizzare disinfettanti domestici.

- applicare saltuariamente una buona cera per automobili (polish) lucidando con un panno morbido per mantenere la lucentezza della superficie in vetroresina.

- mantenere sempre pulita la "guarnizione siliconica senza memoria" della porta, asciugandola con un panno morbido dopo ogni utilizzo della vasca, avendo cura di rimuovere qualsiasi sedimento di sporco o di calcare.

Questa operazione garantirà negli anni la perfetta tenuta della porta, evitando di causare lievi perdite d'acqua.

## AVVERTENZE IMPORTANTI



### Attenzione !

#### Per favore leggere attentamente quanto di seguito indicato:

Prestare attenzione a non far cadere oggetti appuntiti sulla superficie della vasca in quanto possono causare graffi o scheggiature.

Evitare il bagno con temperatura dell'acqua superiore a 45 °C.

Evitare il bagno con ferite aperte o lesioni alla pelle.

Evitare assolutamente l'utilizzo della vasca per il lavaggio di animali di ogni tipo.

Non porre a contatto con la vasca sostanze coloranti (tinture per capelli/stoffa, oppure materiali che possano perdere colore).

In caso di danneggiamento della superficie o di qualsiasi altro tipo di malfunzionamento contattare cortesemente il Servizio Clienti al numero riportato sul retro di questo manuale.

Il Produttore fornirà personale autorizzato con tutte le necessarie informazioni e conoscenze per effettuare la riparazione del danno o del malfunzionamento considerato riparabile.

Il **Produttore NON è responsabile** per:

- Danni o rotture causate dall'uso improprio della vasca o degli accessori con essa forniti, pertanto attenersi sempre alle linee guida di questo manuale.

- Manomissioni della vasca e dei suoi accessori.

- Installazioni realizzate senza seguire scrupolosamente le istruzioni riportate sul "manuale d'installazione" fornito dal Produttore agli installatori.



Via delle Campiane, 6 – 20811 Cesano Maderno (MB)  
Tel. 0362 556354 – Fax 0362 557577 – [info@lineaoceano.it](mailto:info@lineaoceano.it)  
[www. lineaoceano.it](http://www.lineaoceano.it)

